


Toto zařízení **Vám změří**

- hmotnost
- výšku
- BMI (index tělesné hmotnosti)
- index tělesného tuku
- krvní tlak
- srdeční tep

UTILCELL s.r.o.
Sokolova 40
150 00 Praha 5
tel: +420 224 67 952
fax: +420 224 67 953
info@utilcell.com
www.utilcell.com

MIXTA

MĚŘENÍ KREVNIHO TLAKU • VÁŽENÍ
MĚŘENÍ VÝŠKY • MĚŘENÍ SRDEČNÍHO RYTMU
TĚLESNÝ TUK • B.M.I.

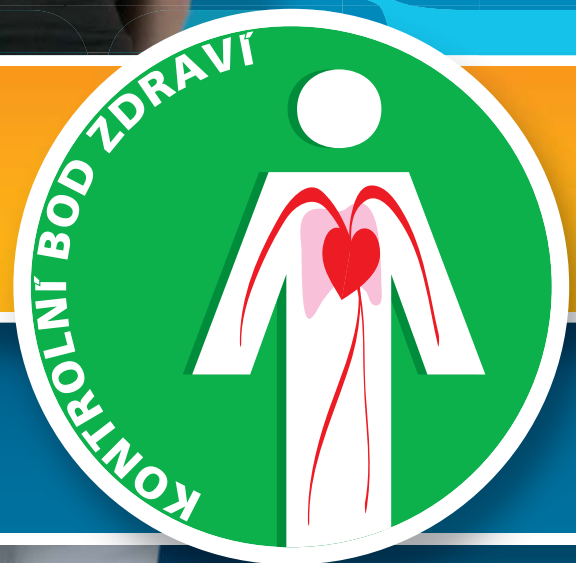

MIXTA



Omezení:
Varujeme před měřením tělesného tuku ženy v těhotenství a osobám s implantovaným elektronickým zařízením jako např. srdeční stimulator.



CO DOKÁŽE MIXTA?

- Změřit hmotnost s přesností 100g pomocí přesného tenzometrického snímače.
- Změřit výšku osoby s přesností 1cm pomocí ultrazvukového senzoru. Tento údaj společně s údajem hmotnosti se použije následně při výpočtu indexu tělesné hmotnosti (B.M.I.).
- Změřit tělesný tuk (index a hmotnost tělesného tuku) metodou bioelektrické impedance (BIA).
- Změřit plně automaticky krevní tlak oscilometrickou metodou. V případě, že se osoba pohybuje či krevní tlak se prudce mění (např. mluví-li osoba během měření), je měření přerušeno.
- Změřit srdeční rytmus a zjistit maximální, minimální a střední hodnotu srdečního tepu.
- Veškeré údaje tisknout na termocitlivý papír.



JAK PRACUJE MIXTA?

- MIXTA pracuje po vhození mincí nebo vložení čipové karty. Hlasová nápověda vede měřnou osobu během celé procedury. Výsledky měření se vytisknou na lístek. V případě použití čipové karty se hodnoty krevního tlaku a hmotnosti posledních 20ti měření zapisují do paměti.
- Po vhození *) 5 Kč mince se provede zvážení, změření výšky a tělesného tuku. Lístek, který se vytiskne, obsahuje kromě naměřených údajů i výpočet B.M.I.
- Po vhození *) 10 Kč mince se provede zvážení, změření výšky, krevního tlaku a tělesného tuku.
- Po vložení čipové karty se provedou stejná měření jako při vhození 10 Kč mince.

*) Místo vhození mincí lze zařízení nastavit na stisknutí červeného (5 Kč) nebo zeleného (10 Kč) tlačítka.



Proč mít KONTROLNÍ BOD ZDRAVÍ?

Projekt Kontrolního bodu zdraví za pomoci jednotky MIXTA přináší do lékárný či ordinací novou dimenzi. Klienti si mohou sami informativně zjistit stav svého krevního tlaku či hmotnosti. Po poradě s lékařem či lékárníkem lze operativně reagovat na svůj zdravotní stav nebo jej takto průběžně sledovat.

Multifunkční měřicí jednotku MIXTA lze provozovat nejen v lékárně, ale i v jiných zařízeních jako jsou například zdravotní lázně, wellness centra, atd.

Použití čipové karty

Vložení čipové karty (Smart card) do přístroje vyvolá stejnou reakci jako vhození mince 10 Kč. Pokud se karta nechá zasunuta během tisku protokolu, následuje soupis dvaceti posledních naměřených hodnot a histogram těchto měření. Jedná se o velice užitečnou funkci, která umožňuje vysledovat trend hmotnosti nebo krevního tlaku měřené osoby.

Jak si multifunkční měřicí jednotku MIXTA objednat?

MIXTA lze objednat faxem, e-mailem nebo poštou na následujících adresách:

UTILCELL, s.r.o.

nám. V. Mrštíka 40, 664 81 Ostrovačice (Brno)
tel.: 546 427 053, 546 427 059
mobil: 724 132 875, fax: 546 427 212
e-mail: corazon@utilcell.com
www.corazonplus.cz

BRUTO, s.r.o.

Nová Trnavská 913, 926 01 Sered'
tel.: 031 / 78 92 830, mobil: 0903 / 92 80 87
fax: 031 / 78 91 371
e-mail: info@bruto.sk

Technické specifikace:

Hmotnost zařízení: 46 kg
Napájecí napětí: 230 V/50Hz
Maximální okamžitý příkon: 140 VA
Výška x šířka x hloubka:
2200 x 360 x 580 mm

